
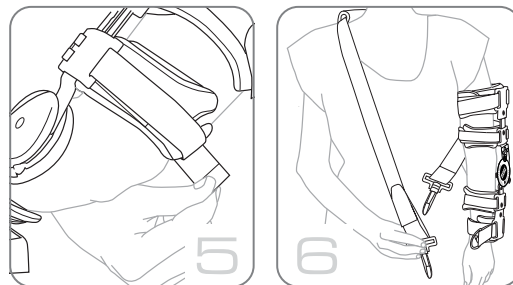
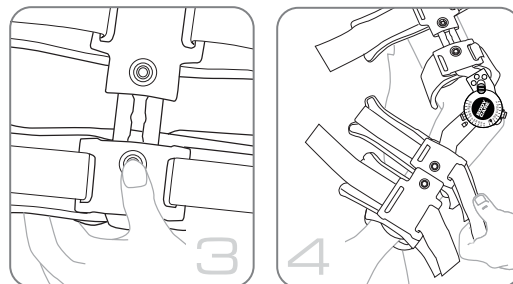



INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

- Desbloquee la bisagra deslizando el botón amarillo de bloqueo rápido en dirección opuesta al centro de la bisagra. Regule la bisagra (Ver AJUSTE DE LA BISAGRA)
- Coloque el estabilizador en la posición deseada. Coloque el punto medio de la bisagra sobre el epicóndilo (lado externo del codo).
- Ajuste el dispositivo al largo del brazo. Mientras mantiene la bisagra alineada con el epicóndilo (punto medio del codo) ajuste la posición de los cuatro brazaletes maleables. Presione el botón deslizante y coloque en la posición deseada los dos brazaletes del antebrazo y luego los dos brazaletes de los bíceps.
Nota: asegúrese que el brazaletes del bíceps proximal se extienda hasta la posición más cómoda pero que no afecte la axila, y que el brazaletes del antebrazo distal esté colocado sobre la apófisis estiloides (el bulto que se encuentra en la cara lateral de la muñeca). NO intente retirar los deslizadores de la barra de la bisagra.
- Comenzando con los brazaletes más cercanos al codo, ajuste los brazaletes alrededor del antebrazo y el bíceps.
- Comience desde la muñeca y presione cada una de las tiras de Velcro[®] Plush. Ajuste las correas de modo que queden bien ceñidas. Recorte las correas según sea necesario.
NOTA: el estabilizador viene con almohadillas para las correas del bíceps para brindar mayor comodidad y evitar que se muevan.

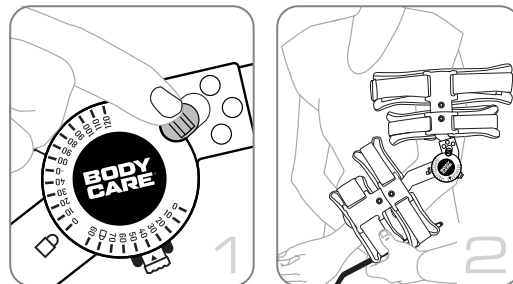


CÓMO COLOCAR EL CABESTRILLO DE HOMBRO:

- Enganche un extremo del sujetador en el pasador con forma de D, páselo por detrás de la cabeza del lado del brazo no lesionado, cruzelo en la espalda, recójalo por debajo de la axila del brazo lesionado y engánchelo también en el pasador en forma de D.
- Ajuste mediante el Velcro[®] a la posición indicada por el médico.

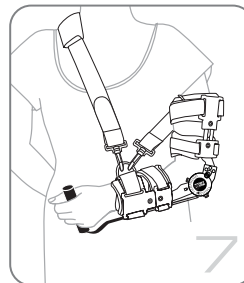

KIT PARA CONTROL DE PRONO/SUPINACIÓN:

- Esta codera viene con un sistema de apoyo para la mano ya colocado, que trae todos los elementos necesarios para aflojar y regular con tornillos según la distancia deseada. El Kit contiene: 4 tornillos y 4 tuercas de repuesto y un destornillador. El Kit puede removerse fácilmente del inmovilizador, destornillando todos los tornillos que lo sostienen a la codera.

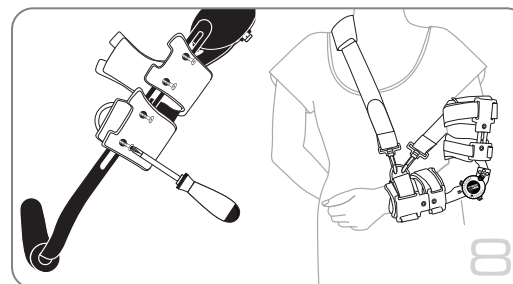

AJUSTE DE LA BISAGRA

- Asegúrese de revisar las órdenes ROM del médico y ajustar la bisagra a esos ajustes.
- Presione el botón de extensión y deslícelo hasta la configuración de ROM deseada. Presione el botón Flexion y deslice hasta la configuración deseada de la ROM. *NOTA: Los ajustes de la ROM se bloquean automáticamente en su lugar.*
- La bisagra de bloqueo permite que la abrazadera se bloquee en un ajuste específico. La bisagra se puede bloquear en incrementos de 10° que van desde -10° a 100°. Flexione la pierna al ajuste deseado y enganche el bloqueo. Esto bloqueará la llave en su lugar independientemente de los ajustes de la ROM. Asegúrese de que la configuración de la ROM no interfiera con el ajuste de bloqueo deseado.

